

Ειδική συλλογή και χειρισμός βιολογικού δείγματος

QuantiferON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)

Δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (IGRAς)

Η QFT®-Plus είναι μια in vitro εργαστηριακή διαγνωστική δοκιμασία ανίχνευσης της λοίμωξης από *M. Tuberculosis* (συμπεριλαμβανομένης και της νόσου) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα ολικού αίματος. Για να διασφαλίσετε ακριβή αποτελέσματα, πρέπει να είστε προσεκτικοί και ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Συλλογή: Η ακρίβεια της δοκιμασίας QFT®-Plus εξαρτάται από την κατάλληλη συλλογή και την επώαση του συλλεχθέντος δείγματος του αίματος. Για κάθε εξεταζόμενο δοκιμάζονται, 6 mL αίματος που συλλέγονται απευθείας σε σωλήνα συλλογής που περιέχει ως αντιπηκτικό **λιθιούχο ηπαρίνη**. Μετά από την συλλογή το δείγμα αφού αναδευθεί 4-6 φορές μεταφέρεται στο σακουλάκι μεταφοράς.

Μεταφορά: Το αρχικό σωληνάριο συλλογής, **χωρίς φυγοκέντρηση**, μεταφέρεται **εντός 16 ωρών σε θερμοκρασία δωματίου (22 ° C ± 5 ° C)** στο κεντρικό εργαστήριο. Συντήρηση για μεγαλύτερες περιόδους, είτε έξω από την καθορισμένη θερμοκρασία, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες αποκρίσεις IFN-γ. Αν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της δοκιμής **εντός 16 ωρών** τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του **Medisyn** ώστε να πληροφορηθείτε για τον εναλλακτικό τρόπο συλλογής. Τα δείγματα παραλαμβάνονται καθημερινά **εκτός Σαββάτου και παραμονής αργιών**. Τα σωληνάκια συλλογής αίματος αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 4°C έως 25°C μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση της δοκιμής.